

# 30GL

眼の奥までもっとクリアに  
ベーシックモデルで確かな診断を

- 日常的な診療環境に最適な設計
- グリノー式光学系で立体的な視界
- 直感的でスムーズな操作を実現



*Serving Your Vision*

日常的な診療環境に最適な設計で、  
使いやすさと求められる機能を両立。  
細部までクリアに捉え、病気の早期発見や  
適切な治療をサポートします。



## 医師と患者さんにやさしく 効率的な診察環境

長時間の診察による医師の負担を  
軽減し疲労を最小限に抑えるために、  
操作部分の大きさ、配置、そして操作感  
に至るまで、使いやすさにこだわって  
設計されています。シンプルな光学  
構造を持ち、直感的な操作が可能で  
す。コストパフォーマンスを重視する  
施設に適しています。  
長寿命で安定した明るさを提供し、  
省エネルギーであるLED光源の採用  
により、ケーブル類を露出しないデザ  
インと、発熱の抑制を実現し、患者さん  
の安全性向上に貢献します。




## グリーン式光学系により、 明るくクリアで 立体感豊富な見え方を提供

融像しやすく立体感豊富なグリーン式顕微鏡を装備した30GLは、  
患部の状態を正確に把握することに貢献します。さらに高輝度  
LED光源とのコンビネーションにより、明るくクリアな見え方を提供  
します。



フィルター未使用

LED本来の青色光が豊富な  
ため、散乱により角膜、房水、  
水晶体、硝子体などが明瞭に  
見える。

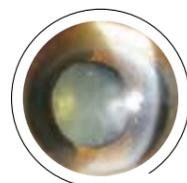


ブルーコレクション  
フィルター使用

LED特有の青色光を抑え、  
眼にやさしい光を実現。  
ハロゲンに近い自然な色味  
で、眼への負担を軽減し、  
バランスの取れた観察像を  
提供。




ブルーカット  
フィルター使用

散乱を抑えて眼底まで光を  
届けつつ、青色光の影響を  
最小限に抑えることで、網膜  
にもやさしい安全性を実現。

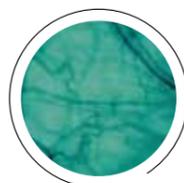

グリーンフィルター  
使用

赤色の血管や血液が黒色に  
見えるため、微細な病変の  
輪郭が明確になり、細部の  
明瞭な観察像を提供。

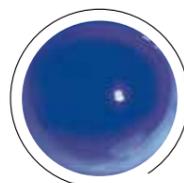

ブルーフィルター  
使用

フルオレセイン染色で角膜や  
涙液の状態を明瞭に把握。  
CL装着時のフィッティング  
確認や眼圧検査時の観察精度  
を高める。



ジョイスティックの周辺に大径の調光ノブ  
などが機能的に配置されているため、片手  
で操作しやすい設計。



大径の調節ノブはサイズや手触りにも  
こだわった快適操作設計。



前置レンズは、額当てのフィンガーレスト  
機能により安定した保持が可能。観察し  
やすく、医師の腕への負担を軽減すると  
ともに、患者さんへの接触も最小限に  
抑える。

## 安定したパフォーマンスを維持する、ベーシックモデル

環境にやさしい長寿命LEDを採用。頻繁な光源交換が不要となるため、メンテナンスの手間が軽減され、  
資源の節約につながります。




製品詳細は  
WEBサイトへ

## 仕様

販売名称		スリットランプ顕微鏡30GL
顕微鏡部	型式	グリノー式双眼実体顕微鏡
	変倍形式	レボルバー式2変倍
	接眼レンズ	10倍、16倍
	総合倍率	10x / 16x (10倍接眼レンズ使用時) 16x / 25x (16倍接眼レンズ使用時)
スリット部	スリット幅	0-14 mm連続可変 (14 mm時ほぼ円形)
	スリット長さ	1-14 mm連続可変
	フィルター	ブルー/グリーン(無赤色)/ブルーコレクション/ブルーカット
	光源	LED (3500K)
電源部	電源電圧	AC 100-240 V (±10%), 0.4-0.2 A
	本体電源入力	DC 5 V 2 A
重量 (パワーアダプターとオプションを除く)		12.5 kg

## 寸法図 外形寸法 (mm)

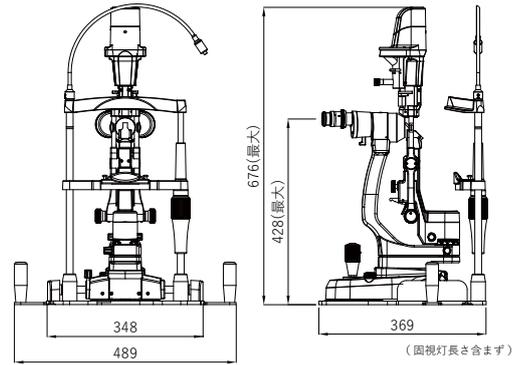

## 豊富なオプションで柔軟なカスタマイズ性



## オプション品

1	AT-1	アブラネーショントノメーター	TAKAGI製スリットランプに幅広く対応
2	TB30	トノメーターベース	AT-1装着用
3	S06-68	ディフューザー	照明光を拡散させ、眼全体や眼の周辺部の観察に有効

安全に正しくお使いになるために、「取扱説明書」をよくお読みいただいでからご使用ください。

- 製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
- 撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

機械器具22 検眼用器具 35148000 細隙灯顕微鏡 一般医療機器

届出番号 20B1X10006000018

# 株式会社タカギセイコー

本社 〒383-8585  
長野県中野市岩船330-2  
TEL.(0269)22-4512  
FAX.(0269)26-6321

東日本支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-21-1  
ショールーム  
(TVC) アウルタワー2階 205号室  
TEL.(03)5615-9282  
FAX.(03)5615-9283

西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市庄内幸町5-19-8  
ショールーム  
(TVC) TEL.(06)6334-4512  
FAX.(06)6334-4521



<https://www.takagi-j.com>

販売代理店

